

日本製


ウイルスの危険から目を守る

マスク装着 アイガード

特許出願済

このアイガードは、どなたでも簡単に飛沫感染のリスクを下げることができます。マスク装着タイプなので締め付け感がなく、とても軽量なので長時間の装着も負担になりません。透明度が高く、視界を遮りにくい構造で、装着したままでメガネの取り外しも可能です。

※マスクは付属しません

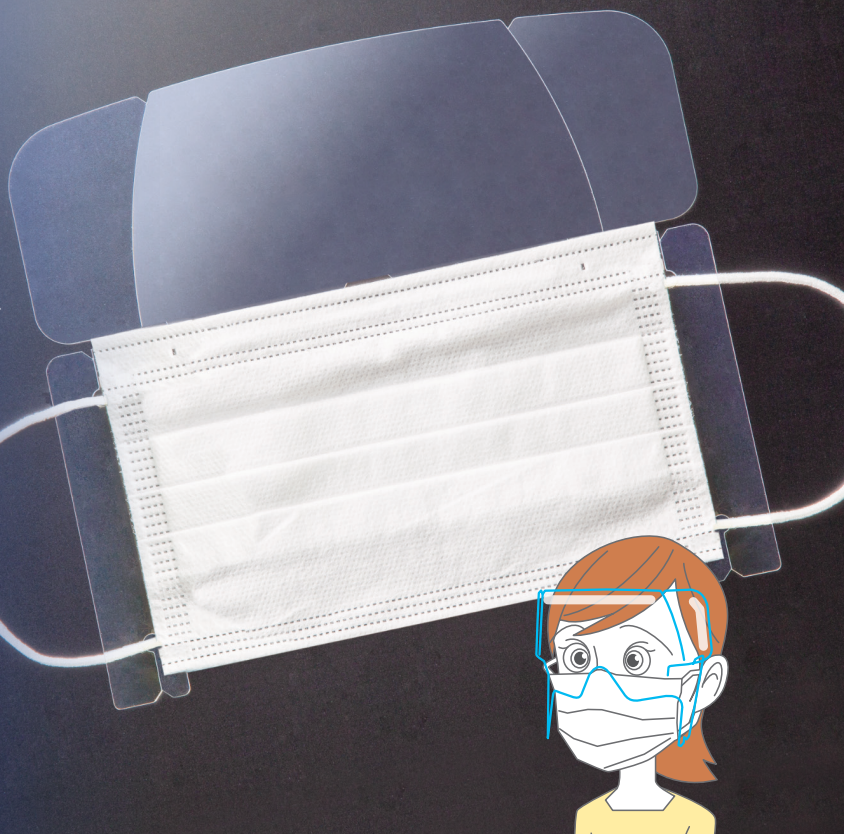

安心安全の
日本製

透明PET
素材超軽量




装着したまま
メガネ着脱可能

マスクのゴムに
固定する
クイック装着

ストック場所を
取らない


“マスク装着アイガード”の使用方法

1

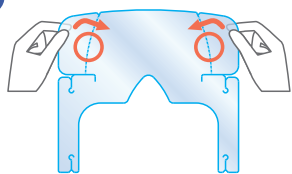

赤丸の部分を内側へ手で折ります。しっかり折ることで着用時の乱反射が軽減されます。

2

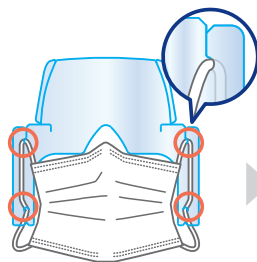

赤丸の箇所にマスクのひもをひっかけます。

3



マスクの位置を調整して装着します。



特設ページはコチラ!

製品仕様

【サイズ】 横204.5mm×縦184.5mm

【材質】 透明PETフィルム(厚み188 μ ~250 μ)
※材料確保のため入荷時により厚み変動します。

【個数】 50枚で袋入れ(説明書1枚同封)
1ケース1,000枚入(20セット)※バラ出荷不可・ケース単位のみ

【名入れ】 担当営業へご確認ください。

製品特徴

簡単に装着!!



髪も乱れない!!

締め付け感が
ない!

アイガードをつけたまま
メガネの着脱も可能!!

視界がとっても
クリア!

軽いので長時間
使用しても疲れな!

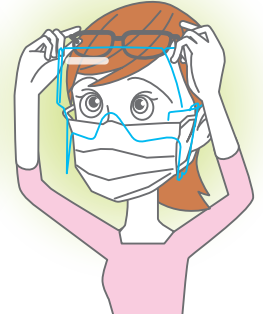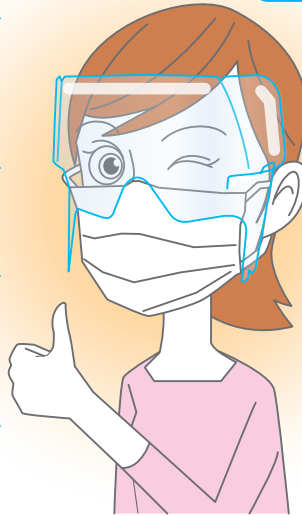

働く方の感染リスクを軽減することができます

1

歯医者



- ☑ 歯科治療
- ☑ 歯面清掃

2

美容院



- ☑ シャンプー
- ☑ カット
- ☑ ヘアスタイリング

3


スーパー



- ☑ お客様対応
- ☑ レジ

4

工場など

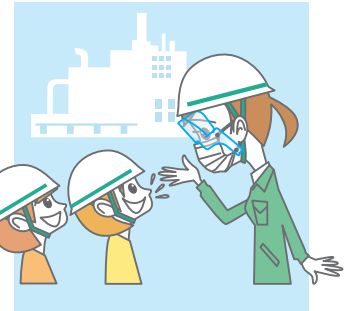

- ☑ 従業員との接触
- ☑ 破片物から目の保護

使用上の注意について

商品についてのお問い合わせ



- ・医療用として製造したものではありません。
- ・全ての飛沫ウィルス・菌・花粉に対して保護できるものではありません。
- ・運転時のご使用はお避けください。
- ・小さいお子様が手にしないようご注意ください。

お問い合わせ先

杉村包装資材(株)
TEL:092-586-5065

製造元:



大阪シーリング印刷株式会社